

RENPHO

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ELIS CHROMA

Модел: R-A017



Прочетете внимателно ръководството преди употреба
и го запазете за бъдеща справка.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност	01
За батерията	02
Какво има в кутията	03
Технически спецификации	04
Вашият Elis Chroma	05
Първоначално включване и нулиране	06
Значение на иконите	06
Инсталиране на приложението и вдвояване	07
Калибриране на Elis Chroma	09
Употреба на Elis Chroma	10
Зареждане на Elis Chroma	11
Отстраняване на неизправности	12
Обслужване на клиенти	13
Изхвърляне и съответствие	14

Благодарим ви, че избрахте RENPHO Elis Chroma. Везната измерва 13 показателя за телесния състав и предлага богат избор от настройки на осветлението чрез приложението RENPHO Health. Пожелаваме ви приятно преживяване и успех по пътя към по-добра форма.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА.

1. Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
2. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
3. Везната е предназначена само за домашна употреба и не е предвидена за медицински или търговски цели. Тя не бива да се използва за диагностициране на заболяване, разстройство или необичайно физическо състояние.
4. Деца под 8 години, както и бременни жени, лица с остеопороза, пейсмейкър, изкуствени стави, преносим ЕКГ апарат или други метални импланти, трябва да използват везната само за измерване на тегло и задължително с обувки, за да се предотврати преминаването на електрически ток при стъпване.
5. Всички данни за телесния състав са само ориентировъчни и не заместват съвет от правоспособен медицински специалист.
6. НЕ претоварвайте везната. Максимална товароносимост: 180 kg (400 lb).
7. Преглеждайте везната за повреди преди всяка употреба. НЕ използвайте повредена везна, за да избегнете неточности или нараняване.
8. Зареждайте везната само с приложения кабел и подходящо зарядно устройство за постоянен ток 5 V (не е включено в комплекта).

9. За точни резултати използвайте везната върху твърда, равна и суха повърхност.
10. За да избегнете смущения или опасност, не използвайте везната в близост до уреди със силни електромагнитни полета.
11. За да предотвратите нараняване, не стъпвайте върху ръбовете на везната, не скачайте и не тропайте върху нея.
12. Везната е деликатен и прецизен измервателен уред. Работете внимателно с нея, за да избегнете счупване.
13. Везната не е водоустойчива. Пазете я суха и никога не я потапяйте във вода. За почистване на повърхността използвайте влажна кърпа или препарат за стъкло. Не използвайте сапун или химически почистващи препарати.
14. Не излагайте везната на пряка слънчева светлина и не я използвайте при високи температури или много висока влажност. Съхранявайте я на хладно и сухо място.
15. Не се опитвайте да разглобявате везната по каквато и да е причина – това може да я повреди.

ЗА БАТЕРИЯТА

1. Не излагайте уреда или батерията на прекомерни температури.
2. Имайте предвид риска клемите на уреда или на батерията да бъдат дадени на късо от метални предмети.
3. Уредът съдържа батерия, която не подлежи на смяна. В края на експлоатационния ѝ живот уредът трябва да се предаде за правилно изхвърляне.
4. Не разглобявайте, не отваряйте и не нарязвайте батерията.
5. Не подлагайте клетките или батериите на механичен удар.
6. При изтичане на клетка не допускайте течността да влезе в контакт с кожата или очите. При контакт изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
7. Акумулаторните клетки и батерии трябва да се заредят преди употреба. Винаги използвайте подходящо зарядно устройство и спазвайте указанията на производителя или ръководството на продукта.

8. Не оставяйте батерията да се зарежда продължително време, когато уредът не се използва.
9. След продължително съхранение може да се наложи батерията да се зареди и разрежи няколко пъти, за да достигне максимална производителност.
10. **ВНИМАНИЕ** – при неправилна употреба батерията в този уред може да предизвика пожар или химическо изгаряне. Не я презареждайте с неподходящо зарядно устройство, не я разглобявайте и не я нагрявайте над 100 °C (212 °F).

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Производител на батерията

Производител	Huizhou We Win Technology Co., Ltd.
Адрес	2F, (Plant B1), Huizhou Huiyang Yinling Cement Co., Ltd., Chanjing Village, Xinxu Town, Huiyang District, Huizhou, 516000 Guangdong, Китай
Уебсайт	http://wewinpower.com
Електронна поща	13322621010@163.com


КАКВО ИМА В КУТИЯТА

- Везна Elis Chroma × 1
- Кабел за зареждане USB-C × 1
- Ръководство за потребителя × 1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Наименование	Везна за телесен състав
Модел	R-A017
Мерни единици	lb / kg / st / st:lb
Обхват на измерване	0,2 – 180 кг (0,4 – 400 lb)
Стъпка на измерване	0,05 кг (0,2 lb)
Телесни показатели	13
Размери	295 × 280 × 25,4 мм (11,6 × 11 × 1 инча)
Батерия	1000 mAh, 3,7 Wh (вградена, презареждаема)
Вход	5 V, 1 A
Време за зареждане	около 2,5 часа
Автоматично изключване	след 10 секунди без активност
Съвместимост	iOS 12.0 или по-нова / Android 7.0 или по-нова
Приложение	RENPHO Health

ВАШИЯТ ELIS CHROMA

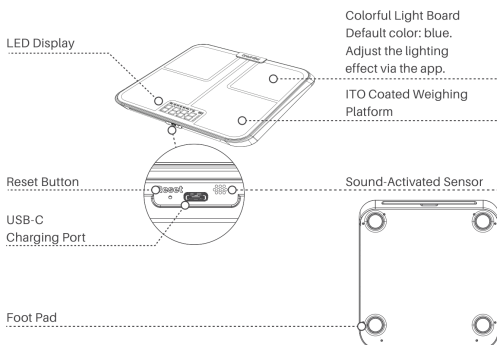


Надписите върху схемата означават: „LED Display“ – LED дисплей; „Colorful Light Board“ – цветно светлинно табло (цветът по подразбиране: син, светлинният ефект се управлява от приложението); „ITO Coated Weighing Platform“ – платформа за измерване с ITO покритие; „Sound-Activated Sensor“ – сензор за активиране по звук; „Reset Button“ – бутон за нулиране; „USB-C Charging Port“ – порт USB-C за зареждане; „Foot Pad“ – краче.

Осветление Chroma

- Цветно светлинно табло: цветът по подразбиране е син. Светлинният ефект се настройва от приложението RENPHO Health. Везната има и сензор за активиране по звук.
- Индикация „SEt“: показва се, докато везната е в режим за настройка на осветлението Chroma. Режимът се прекратява при излизане от екрана за настройка в приложението или при прекъсване на връзката.

ПЪРВОНАЧАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И НУЛИРАНЕ

1. За да включите везната за първи път, натиснете бутона за нулиране с игличка (не е включена в комплекта) или свържете везната към захранване с приложения кабел и подходящо зарядно устройство (не е включено).
2. За да нулирате везната, вкарайте игличка в отвора на бутона за нулиране, натиснете и отпуснете.

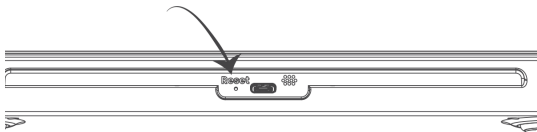

За да пести енергия, везната се изключва автоматично след 10 секунди без активност.

ЗНАЧЕНИЕ НА ИКОНИТЕ

	BMI	 %	st lb kg	0000	
User Identification	Body Mass Index	Body Fat (%)	Units Switched via the app.	Measuring Body Fat	Charging

„User Identification“ – разпознаване на потребителя; „Body Mass Index“ – индекс на телесна маса (ИТМ); „Body Fat (%)“ – телесни мазнини (%); „Units“ – мерни единици (st, lb, kg), сменят се от приложението; „Measuring Body Fat“ – измерване на мазнините; „Charging“ – зареждане.

	CAL	Err	SET
Bare Feet Detected Step onto the scale with bare, dry feet for body fat measurement.	Calibrating Calibrate the scale before each use.	Overloaded Maximum Capacity: 400lb / 180kg.	Setting Chroma Customization After exiting the Chroma Customization interface of the app or disconnecting the scale, the SET mode will exit.

„Bare Feet Detected“ – разпознати боси крака (стъпете върху везната с боси и сухи крака за измерване на телесните мазнини); „Calibrating“ (CAL) – калибриране (калибрирайте везната преди всяка употреба); „Overloaded“ (Err) – претоварване (максимална товароносимост 180 кг / 400 lb); „Setting Chroma Customization“ (SET) – режим за настройка на осветлението Chroma.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО И СДВОЯВАНЕ

1. Изтеглете приложението RENPHO Health

Сканирайте QR кода или потърсете „RENPHO Health“ в App Store или Google Play. Системни изисквания: iOS 12.0 или по-нова версия, Android 7.0 или по-нова версия.



Поради непрекъснатите обновявания приложението „RENPHO Health“ може да изглежда малко по-различно.

2. Вход или регистрация

- Влезте директно със съществуващ акаунт за приложението RENPHO.
- Ако нямате акаунт, докоснете „Sign up“ (Регистрация), използвайте адреса на електронната си поща и попълнете личните данни. Тази стъпка е необходима за точното изчисляване на здравните показатели.

Можете да влезете и в режим „Guest Mode“ (Гост), ако не желаете да се регистрирате. В този случай данните от измерванията няма да бъдат запазени, ако влезете от друго устройство.

3. Сдвоете везната


Преди сдвояване включете безжичната връзка на смартфона си.

1. Отворете приложението RENPHO Health, поставете везната върху твърда и равна повърхност и стъпете върху нея с боси и сухи крака.
2. Докоснете „+“ в горния десен ъгъл на страницата „Home“ (Начало) и изберете своята везна за телесен състав от списъка с устройства.
3. Следвайте указанията в приложението, за да завършите сдвояването.

КАЛИБРИРАНЕ НА ELIS CHROMA

Калибрирайте везната преди всяка употреба, за да осигурите точност.

1. Поставете везната върху равна и твърда повърхност. Избягвайте килими.
2. Стъпете върху везната с един крак, за да я активирате, и слезте.
3. Дисплеят показва „CAL“, а след това „0.0“ или „0.00“ – калибрирането е завършено.

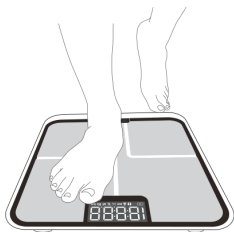


CAL → 00
or
CAL → 000

На схемата „0“ означава „или“.

УПОТРЕБА НА ELIS CHROMA

1. Уверете се, че везната е поставена върху равна и твърда повърхност.
2. След калибриране стъпете върху везната с боси и сухи крака, стойте неподвижно и изчакайте окончателния резултат на дисплея.
3. След измерването везната изпраща данните към приложението. Отворете приложението, за да синхронизирате и разгледате подробните си показатели, да проследите напредъка си и да използвате допълнителните функции.

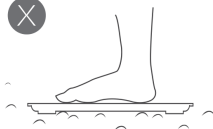


Ляво (отметка): везната е поставена върху твърда и равна повърхност. Дясно (кръст): везната е поставена върху килим – измерването няма да бъде точно.

За да виждате тегло, ИТМ и телесни мазнини директно върху дисплея на везната, свържете везната с приложението RENPHO Health и направете първо измерване, което служи за разпознаване на потребителя.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ELIS CHROMA

Charging Time: approx. 2.5 hours

DC 5V $\equiv$ 1A Charger (Not Included)

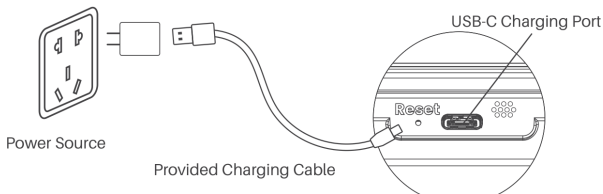

Надписите върху схемата означават: „Charging Time: approx. 2.5 hours“ – време за зареждане: около 2,5 часа; „DC 5V 1A Charger (Not Included)“ – зарядно устройство за постоянен ток 5 V / 1 A (не е включено); „Power Source“ – източник на захранване; „Provided Charging Cable“ – приложен кабел за зареждане; „USB-C Charging Port“ – порт USB-C за зареждане.

- Не използвайте везната за измерване, докато се зарежда.
- Изсушете порта, ако е влажен, преди да включите кабела.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

1. Показания на дисплея



Тегло, ИТМ и телесни мазнини: везната е разпознала потребителя и измерването е направено с боси крака.



Тегло и ИТМ: везната е разпознала потребителя, но измерването е направено с чорапи или обувки.



Само тегло: везната не е разпознала потребителя и измерването е направено с чорапи или обувки.



Само тегло: везната не е разпознала потребителя, въпреки че измерването е направено с боси крака.

2. Други проблеми

Проблем	Решение
Везната не отчита телесни мазнини и/или други данни.	Уверете се, че краката ви са сухи и боси. Стойте неподвижно, докато на дисплея се появи окончателният резултат. Ако все още няма резултат, намажете стъпалата с крем и измерете отново или помолете друг човек да изпълни същите стъпки.
Регистрирах акаунт на сайта на RENPHO, но не мога да вляза с него в приложението RENPHO Health.	Сайтът на RENPHO и приложението RENPHO Health са две отделни системи. Създайте отделен акаунт за приложението RENPHO Health.
Виждам тегло, телесни мазнини и ИТМ на дисплея на везната, но моите близки не.	Близките ви трябва да попълнят своя профил във вашето приложение чрез функцията „add a member“ (добавяне на член) или да влязат в RENPHO Health със собствен акаунт.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Свържете се с нас при въпроси или затруднения. Екипът на RENPHO отговаря бързо в рамките на работното време.

Телефон (ЕС/Германия)	+49 40 23969285, понеделник – петък, 9:00 – 18:00 (CET)
-----------------------	--

Телефон (Обединено кралство)	+44 (0)7434 666088, понеделник – петък, 9:00 – 17:00 (GMT)
------------------------------	---

Имейл (ЕС и UK)	support-eu@renpho.com
-----------------	-----------------------

Имейл (САЩ и Канада)	support@renpho.com
----------------------	--------------------

При дефектен продукт или връщане посочете номера на поръчката си. Запазете всички части за проверка или ремонт.

ИЗХВЪРЛЯНЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ



Символ „зачеркнат контейнер“

Символът на зачеркнатия контейнер означава, че по закон сте задължени да изхвърляте тези уреди отделно от несортираните битови отпадъци. Батериите и акумулаторите, които не са трайно вградени, трябва да бъдат извадени предварително и изхвърлени отделно.

Връщане на стари уреди

Собствениците на стари уреди могат да ги предадат в предвидените от публичните органи по управление на отпадъците пунктове за връщане или събиране, за да се осигури правилното им третиране.

Лични данни

Всички крайни потребители носят отговорност за изтриването на личните си данни от уредите, които предават за изхвърляне.



Батерии и акумулатори

1. Символът на зачеркнатия контейнер върху батерии или акумулатори означава, че те не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци в края на живота им.
2. По закон сте задължени да върнете старите батерии и акумулатори след употреба. Това може да стане безплатно в пункт за събиране във вашия район. Адреси на подходящи пунктове можете да получите от общината.
3. Батериите може да съдържат вещества, вредни за околната среда и човешкото здраве. Разделното събиране и рециклиране цели да предотврати тези негативни последици.
4. Избягвайте образуването на отпадъци от батерии – не оставяйте небрежно батерии или електрическо и електронно оборудване, съдържащо батерии, на обществени места.



Декларация за съответствие

С настоящото Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. декларира, че това оборудване съответства на Директива 2014/53/ЕС, Директива 2011/65/ЕС и другите приложими разпоредби. Пълният текст на декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Максимална радиочестотна мощност

6,78 dBm

Работна честота

2402 MHz – 2480 MHz

Производител: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd., No. 810-C063, 8th Floor, Xiangbin International Financial Centre, No.18, West Free Trade Street, Qianhai Bay, Shenzhen, Guangdong Province, 518000, Китай.