


РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

EYERIS 1

Модел: RF-EM001R

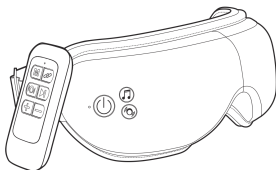

Прочетете внимателно ръководството преди употреба
и го запазете за бъдеща справка.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност	01
За батерията	03
Технически спецификации	05
Запознайте се с Eyeris 1	07
Зареждане	07
Поставяне на уреда	08
Работа с уреда	09
Дистанционно управление	10
Bluetooth връзка	11
Индикатор за захранване	12
Почистване и поддръжка	12
Отстраняване на проблеми	13
Обслужване на клиенти	15
Изхвърляне и съответствие	16

Благодарим ви, че избрахте RENPHO Eyeris 1. Прочетете внимателно това ръководство и използвайте продукта само по описания начин. RENPHO не носи отговорност за наранявания, причинени от неправилна употреба или от неспазване на указанията. Запазете ръководството за бъдеща справка.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА.

1. Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
2. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
3. Уредът е предназначен само за домашна употреба и не е предвиден за медицински цели. Той не бива да се използва за лечение или облекчаване на заболяване или необичайно физическо състояние.
4. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца.
5. Консултирайте се с лекар преди употреба, ако попадате в някоя от следните групи: лица, претърпели очна операция, или с очни заболявания като глаукома, катаракта и отлепване на ретината; възрастни хора; бременни жени и жени след раждане; лица с алергия към кожни материали; лица с кожни инфекции, чувствителна кожа, зачервяване или изгаряния; лица с отоци или рани около очите; лица с пейсмейкър или друг имплантиран медицински апарат; лица със сърдечни заболявания, злокачествени тумори или други сериозни здравословни състояния; лица, които са на лечение; лица с високо или необичайно кръвно налягане.
6. Ако усетите дискомфорт по време на употреба, спрете уреда незабавно.
7. Свалете контактни лещи, очила, изкуствени мигли, фибри за коса и всякакви други аксесоари преди употреба.

8. Не използвайте уреда, докато шофирате, ходите или тичате.
9. Избягвайте контакт с остри предмети.
10. Високите температури могат да причинят изгаряния независимо от избраната настройка. Не използвайте уреда върху бебета, лица с увреждания, спящи или в безсъзнание. Проверявайте често кожата в контакт с нагрятата повърхност, за да намалите риска от образуване на мехури.

ОПАСНОСТ – за да намалите риска от токов удар

1. Никога не използвайте карфици или други метални закопчалки с този уред.
2. Не използвайте уреда с мокри ръце и не го потапяйте във вода или друга течност.

ВНИМАНИЕ – за да намалите риска от изгаряния

1. Използвайте нагрятите повърхности внимателно. Възможни са сериозни изгаряния. Не използвайте върху зони с намалена чувствителност на кожата или при лошо кръвообращение. Употребата на нагриване от деца или от лица с ограничени възможности без надзор може да бъде опасна.
2. Уредът има нагрята повърхност. Лицата, нечувствителни към топлина, трябва да внимават при употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – риск от изгаряния, пожар и токов удар

За да намалите риска от изгаряния, пожар, токов удар или нараняване:

1. Не използвайте уреда под одеяло или възглавница. Може да възникне прегряване и да причини пожар, токов удар или нараняване.
2. Необходим е строг надзор, когато уредът се използва от, върху или в близост до деца, болни или лица с увреждания.
3. Използвайте уреда само по предназначението, описано в това ръководство. Не използвайте приставки, които не са препоръчани от производителя.
4. Никога не използвайте уреда, ако не работи правилно, ако е повреден или ако е паднал във вода.
5. Никога не изпускайте и не поставяйте предмети в отворите на уреда.

6. Не използвайте уреда там, където се употребяват аерозолни продукти или се подава кислород.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ЗА БАТЕРИЯТА

1. Не използвайте уреда, докато се къпете или сте под душа.
2. Не поставяйте и не съхранявайте уреда там, откъдето може да падне или да бъде издърпан във вана или мивка.
3. Не поставяйте и не изпускайте уреда във вода или друга течност.
4. Не излагайте уреда или батерията на прекомерни температури.
5. Имайте предвид риска клемите на уреда или на батерията да бъдат дадени на късо от метални предмети.
6. Уредът съдържа батерия, която не подлежи на смяна. В края на живота на батерията уредът трябва да се изхвърли по правилния начин.
7. Не разглобявайте, не отваряйте и не разкъсвайте батерията.
8. Не подлагайте клетките или батериите на механичен удар.
9. При изтичане на клетка не допускате течността да влезе в контакт с кожата или очите. При контакт измийте засегнатата зона с обилно количество вода и потърсете лекарска помощ.
10. Акумулаторните клетки и батерии трябва да се заредят преди употреба. Винаги използвайте правилното зарядно устройство и следвайте указанията на производителя.
11. Не оставяйте батерията да се зарежда продължително време, когато не се използва.
12. След дълъг период на съхранение може да е необходимо клетките или батериите да се заредят и разреждат няколко пъти, за да достигнат максимална производителност.
13. **ВНИМАНИЕ** – батерията в този уред може да представлява риск от пожар или химическо изгаряне при неправилна употреба. Не я зареждайте неправилно, не я разглобявайте и не я нагрявайте над 100 °C (212 °F).

14. Извадете използваните батерии и ги рециклирайте или изхвърлете незабавно съгласно местните разпоредби, като ги държите далеч от деца.
15. НЕ изхвърляйте батерии в битовите отпадъци и не ги горете.
16. Дори използваните батерии могат да причинят тежко нараняване или смърт.
17. При поглъщане на клетка или батерия потърсете незабавно лекарска помощ. Поглъщането на литиеви батерии тип копче може да причини химически изгаряния, перфорация на меките тъкани и в тежки случаи смърт. Те трябва да бъдат извадени незабавно.
18. Почистете контактите на батерията и на уреда преди поставяне.
19. Непрезареждаемите батерии не трябва да се зареждат.
20. Не разреждайте принудително, не презареждайте, не разглобявайте, не нагрявайте над указаната от производителя температура и не изгаряйте батериите. Това може да доведе до нараняване вследствие на изпускане на газове, изтичане или експлозия с химически изгаряния.
21. Уверете се, че батериите са поставени правилно според поляритета (+ и -).
22. Не смесвайте стари с нови батерии, нито батерии от различни марки или видове, като алкални, въглерод-цинкови или акумулаторни.
23. Извадете батерията от дистанционното управление и я рециклирайте или изхвърлете съгласно местните разпоредби, ако то няма да се използва продължително време.
24. Винаги затваряйте докрай отделението за батерия. Ако отделението не се затваря сигурно, спрете да използвате дистанционното управление, извадете батерията и я дръжте далеч от деца.
25. Изтощените батерии трябва да се извадят незабавно от дистанционното управление и да се изхвърлят по правилния начин. Ако разредени батерии останат дълго време в дистанционното, електролитът може да изтече и да повреди дистанционното или да причини нараняване.
26. Литиева батерия с повреден корпус не бива да се излага на вода.

27. Съхранявайте неизползваните батерии в оригиналната им опаковка, далеч от метални предмети. Ако вече са разопаковани, не ги смесвайте.
28. Не използвайте модифицирани или повредени батерии.
29. Не позволявайте на деца да сменят батериите без надзор от възрастен.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Наименование	Масажор за очи
Модел	RF-EM001R
Цвят	Бял
Вход	5 V / 1 A
Номинална мощност	5 W
Автоматично изключване	15 минути
Батерия на уреда	1200 mAh / 4,44 Wh (вградена)
Батерия на дистанционното	алкална, 12 V
Време за зареждане	2,5 – 3 часа
Време на работа	60 – 120 минути
Размери	20 × 14 × 11 cm


Тегло	450 г
Материал	ABS и PU кожа, дерматологично тествана
Нагряване	40 – 42 °C
Свързаност	Bluetooth (само за възпроизвеждане на музика)

Какво има в кутията

- Масажор за очи Eyeris 1 × 1
- Кабел за зареждане USB micro-B × 1
- Дистанционно управление × 1
- Батерия за дистанционното управление × 1
- Калъф за съхранение × 1
- Ръководство за потребителя × 1

Bluetooth връзката на този уред служи единствено за възпроизвеждане на музика. Уредът не измерва и не предава здравни данни и не работи с приложения за здраве и фитнес.


ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С EYERIS 1

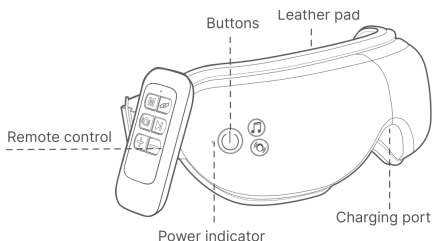

Надписите върху схемата означават: „Remote control“ – дистанционно управление, „Buttons“ – бутони, „Leather pad“ – подложка от PU кожа, „Power indicator“ – индикатор за захранване, „Charging port“ – порт за зареждане.

ЗАРЕЖДАНЕ

Зареждайте уреда с включения кабел и зарядно устройство 5 V / 1 A за постоянен ток (не е включено в комплекта). Кабелът може да се включи и в USB порт на лаптоп, компютър или друго устройство.

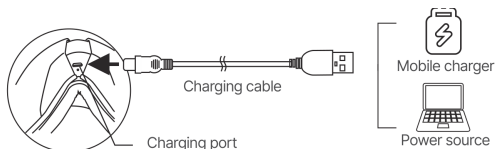

Надписите върху схемата означават: „Charging port“ – порт за зареждане, „Charging cable“ – кабел за зареждане, „Mobile charger“ – зарядно устройство, „Power source“ – източник на захранване.

Забележка:

Уредът НЕ може да се включва, докато се зарежда.


По време на зареждане индикаторът свети постоянно в червено.

След пълно зареждане индикаторът светва в зелено.

Пълното зареждане отнема около 2,5 – 3 часа.

ПОСТАВЯНЕ НА УРЕДА

1. Свалете всички аксесоари за очи (очила, контактни лещи, изкуствени мигли и други), които биха попречили при употреба.
2. Поставете уреда така, че да приляга добре върху очите. Нагласете ластичната лента зад главата си според размера на главата.

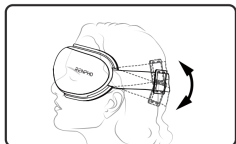

Забележка:

При първа употреба се препоръчва да започнете със слаб натиск и след това да изберете силен, ако ви е удобно. Ако усетите болка, върнете се на слаб натиск или разхлабете лентата.

Не се препоръчва употреба над 20 минути наведнъж.

Зрението ви може да остане замъглено за кратко след употреба – това е нормално. Затворете очи за няколко минути, докато зрението се нормализира.

РАБОТА С УРЕДА

Петте режима

М 1	Въздушен натиск и нагряване
М 2	Въздушен натиск, нагряване и постоянна вибрация
М 3	Само въздушен натиск
М 4	Само нагряване
М 5	Периодична вибрация

Бутони върху уреда



Бутон за захранване

Задръжте, за да включите или изключите уреда. Настройки по подразбиране: слаб въздушен натиск, висока топлина, ниво на звука 0. Индикаторът светва или изгасва. Кратко натискане превключва режимите.



Бутон за музика

Натиснете, за да смените нивото на звука: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / максимално. Задръжте, за да преминете към следващата мелодия (две вградени мелодии и музика по Bluetooth).



Бутон за натиск

Натиснете, за да превключите между слаб натиск, силен натиск и без натиск. Задръжте, за да превключите между гласов режим (по подразбиране) и тих режим. В тихия режим гласовите подсказки и вградените мелодии са изключени.

Когато е избран режим с нагриване, можете да задръжите едновременно бутон за музика и бутон за натиск върху уреда, за да смените степента на нагриване между висока (по подразбиране) и ниска.

Препоръчва се след употреба да избършете потта, околоочния крем или козметичните остатъци от повърхността от PU кожа, за да удължите живота на уреда.

Автоматично изключване: уредът спира сам след 15 минути непрекъсната работа (продължителността на един масажен цикъл). Ако е активиран режим 3 (само въздушен натиск) и е избрано „без натиск“, уредът се изключва автоматично след 30 секунди бездействие.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

1. Поставете включената в комплекта батерия в дистанционното управление преди употреба. Винаги поставяйте батерията според поляритета (+ и -), обозначен върху батерията и дистанционното.
2. Дистанционното управление работи само когато уредът е включен и трябва да бъде насочено към него.

M

Бутон M

Натиснете, за да смените режима. Задръжте, за да изключите уреда.



Бутон за натиск

Натиснете, за да регулирате нивото на въздушния натиск.
Задръжте, за да смените степента на нагряване между висока (по подразбиране) и ниска, когато е избран режим с нагряване.



Бутон Bluetooth

Натиснете, за да включите или изключите Bluetooth.



Следваща мелодия

Натиснете, за да преминете към следващата мелодия. Задръжте, за да превключите между гласов и тих режим.



Сила на звука + / -

Натиснете, за да увеличите или намалите нивото на звука.
Задръжте, за да зададете веднага максимално ниво или ниво „0“.

Забележка:

Почистете контактите на батерията и на дистанционното преди поставяне.

Винаги избирайте батерия с правилния размер и тип.

Не свързвайте на късо, не зареждайте и не разреждайте принудително батерията.

Извадете батерията от дистанционното, ако то няма да се използва продължително време.

BLUETOOTH ВРЪЗКА

1. Включете уреда (индикаторът мига в синьо) и включете Bluetooth на телефона си.
2. Потърсете „Eye Massager“ и се свържете. Индикаторът на уреда светва постоянно в синьо.
3. Управлявайте плейлиста и силата на звука от уреда, от дистанционното или от телефона.
4. За да прекъснете връзката, натиснете бутона Bluetooth на дистанционното или изключете Bluetooth от телефона си.

Забележка:

След успешно сдвояване уредът се свързва автоматично с Bluetooth при всяко включване.

Вградената музика се възобновява, ако спрете своя плейлист или прекъснете Bluetooth връзката.

При активиран тих режим музиката по Bluetooth се поставя на пауза, но може да бъде възобновена от телефона.

След свързване по Bluetooth музиката се възпроизвежда през уреда при ниво на звука 5 по подразбиране.

ИНДИКАТОР ЗА ЗАХРАНВАНЕ

Състояние	Индикатор
Уредът се включва или изключва	Индикаторът светва или изгасва
Сдвояване	Мига бавно в синьо
Сдвоено устройство	Свети постоянно в синьо
Зареждане	Свети постоянно в червено
Напълно зареден	Свети в зелено

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1. Изключете уреда или извадете кабела за зареждане и оставете уреда да изстине преди почистване или прибиране.
2. Избършете повърхността с мека памучна кърпа, леко навлажнена с мек почистващ препарат. Не използвайте абразивни материали, разтворители, химически или силни почистващи препарати.

3. Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина или високи температури. Ако уредът не е използван повече от 3 месеца, заредете го преди употреба.
4. Не разглобявайте уреда сами. Това може да го повреди.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Неуспешно или бавно зареждане	Зареждане със зарядно с по-високо напрежение	Използвайте зарядно 5 V / 1 A за постоянен ток (не е включено).
Неуспешно или бавно зареждане	Зареждане с несъвместим кабел	Използвайте само включения в комплекта кабел.
Болка по време на масаж	Лентата е твърде стегната или уредът е поставен неправилно	Разхлабете лентата и подравнете носа си с уреда.
Болка по време на масаж	Избран е силен натиск	Превключете на слаб натиск.
Болка по време на масаж	Уредът е използван продължително време	Ограничете употребата до 20 минути.
Няма нагряване или то е недостатъчно	Нагряването отнема време	Изчакайте до 5 минути за загряване.

Проблем	Възможна причина	Решение
Няма нагряване или то е недостатъчно	Избран е режим без нагряване	Изберете режим с нагряване.
Няма нагряване или то е недостатъчно	Избрана е ниска степен на нагряване	Задръжте бутона за музика и бутона за натиск, за да преминете на висока степен.
Няма глас, няма музика или звукът е слаб	Избран е тих режим	Превключете на гласов режим.
Няма глас, няма музика или звукът е слаб	Свързаната музика е на ниво 0 или на ниска сила	Натиснете бутона за музика, за да увеличите звука.
Няма глас, няма музика или звукът е слаб	Ниска сила на звука е избрана от телефона	Регулирайте силата на звука от телефона.
Уредът не се свързва с телефона	Уредът е свързан с друго устройство	Прекъснете връзката с другото устройство.
Уредът се изключва внезапно	Изтощена батерия	Заредете уреда.
Уредът се изключва внезапно	Изтекъл е таймерът за автоматично изключване	Включете уреда отново при нужда.

Проблем	Възможна причина	Решение
Няма натиск	Избран е режим „без натиск“	Натиснете бутона за натиск, за да зададете ниво на въздушния натиск.
Няма натиск	Избран е режим без функция за въздушен натиск	Изберете режим с въздушен натиск.
Дистанционното не работи	Уредът не е включен	Включете уреда.
Дистанционното не работи	Дистанционното не е насочено към уреда	Насочвайте дистанционното към уреда при употреба.
Дистанционното не работи	Изтощена батерия	Поставете нова батерия.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Свържете се с нас при въпроси или затруднения. Екипът за обслужване на клиенти на RENPHO отговаря бързо в рамките на работното време.

Телефон (Обединено кралство)	+44 (0)7434 666088, понеделник – петък, 9:00 – 17:00 (GMT)
Имейл (ЕС и УК)	support-eu@renpho.com

При дефектни продукти или връщане на артикули се свържете с нас, като посочите номера на поръчката си. НЕ изхвърляйте части от продукта – те може да са необходими за проверка или ремонт.

ИЗХВЪРЛЯНЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ



Символ „зачеркнат контейнер“

Символът на зачеркнатия контейнер означава, че по закон сте задължени да изхвърляте тези уреди отделно от несортираните битови отпадъци. Батериите и акумулаторите, които не са трайно вградени, трябва да бъдат извадени предварително и изхвърлени отделно.

Връщане на стари уреди

Собствениците на стари уреди могат да ги предадат в предвидените от публичните органи по управление на отпадъците пунктове за връщане или събиране, за да се осигури правилното им третиране.

Лични данни

Всички крайни потребители носят отговорност за изтриването на личните си данни от уредите, които предават за изхвърляне.



Батерии и акумулатори

1. Символът на зачеркнатия контейнер върху батерии или акумулатори означава, че те не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци в края на живота им.
2. По закон сте задължени да върнете старите батерии и акумулатори след употреба. Това може да стане безплатно в пункт за събиране във вашия район. Адреси на подходящи пунктове можете да получите от общината.

3. Батериите може да съдържат вещества, вредни за околната среда и човешкото здраве. Разделното събиране и рециклиране цели да предотврати тези негативни последици.
4. Избягвайте образуването на отпадъци от батерии – не оставяйте небрежно батерии или електрическо и електронно оборудване, съдържащо батерии, на обществени места.



Декларация за съответствие

С настоящото Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. декларира, че това оборудване съответства на Директива 2014/53/ЕС, Директива 2011/65/ЕС и другите приложими разпоредби. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

**Максимална радиочестотна
мощност**

-2,17 dBm

Работна честота

2402 MHz – 2480 MHz

Производител на батерията

Dongguan Lean Power New Energy Technology Co., Ltd., Room 201, Building 3, No. 7 Jinchuan Second Road, Jinchuan Industrial Zone, Xiegang Town, Dongguan City, Guangdong Province, Китай. www.leanpowercell.com, xi@sdikj.com

Производител: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd., No. 810-C063, 8th Floor, Xiangbin International Financial Centre, No.18, West Free Trade Street, Qianhai Bay, Shenzhen, Guangdong Province, 518000, Китай.