

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

EYERIS 2

Модел: R-G006



Прочетете внимателно ръководството преди употреба
и го запазете за бъдеща справка.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност	01
За батерията	03
Употреба на продукта	04
Отстраняване на проблеми	08
Почистване и поддръжка	10
За продукта	11
Обслужване на клиенти	12
Изхвърляне и съответствие	12

Благодарим ви, че избрахте RENPHO Eyeris 2! Прочетете внимателно това ръководство и използвайте продукта само по описания начин. RENPHO не носи отговорност за наранявания, причинени от неправилна употреба или от неспазване на посочените указания. Запазете ръководството за бъдеща справка.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА.

1. Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
2. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
3. Уредът е предназначен само за домашна употреба и не е предвиден за медицински цели. Той не бива да се използва за лечение или облекчаване на заболяване или необичайно физическо състояние.
4. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца.

Консултирайте се с лекар преди употреба, ако попадате в някоя от следните групи:

- лица, претърпели очна операция, или с очни заболявания като глаукома, катаракта и отлепване на ретината;
- възрастни хора;
- бременни жени и жени в период след раждане;
- лица с алергия към кожни материали;
- лица с кожни инфекции, чувствителна кожа, зачервяване и/или изгаряния по кожата;
- лица с отоци или рани в областта около очите;
- лица с пейсмейкър или други имплантирани медицински изделия;

- лица със сърдечни заболявания, злокачествени тумори или други сериозни здравословни състояния;
 - лица, които са на медицинско лечение;
 - лица с високо или необичайно кръвно налягане.
5. Ако усетите какъвто и да е дискомфорт по време на употреба, спрете да използвате уреда незабавно.
 6. Свалете контактни лещи, очила, изкуствени мигли, фиби и всички други аксесоари преди употреба.
 7. Не използвайте уреда, докато шофирате, вървите или тичате.
 8. Избягвайте контакт с остри предмети.
 9. Високите температури могат да причинят изгаряния независимо от избраната настройка. Не използвайте уреда върху бебета, лица с увреждания, спящи или в безсъзнание. Проверявайте често кожата в контакт с нагрятата повърхност, за да намалите риска от образуване на мехури.

ОПАСНОСТ

За намаляване на риска от токов удар:

1. Никога не използвайте карфици или други метални закопчалки с този уред.
2. Не работете с уреда с мокри ръце и не потапяйте уреда във вода или друга течност.

ВНИМАНИЕ

За намаляване на риска от изгаряния:

1. Използвайте нагрятите повърхности внимателно. Те могат да причинят сериозни изгаряния. Не използвайте върху зони с намалена чувствителност на кожата или при лошо кръвообращение. Употребата на нагряване без надзор от деца или от лица с ограничени възможности може да бъде опасна.
2. Уредът има нагрятата повърхност. Лицата, нечувствителни към топлина, трябва да внимават при употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За намаляване на риска от изгаряния, пожар, токов удар или нараняване:

1. Не използвайте уреда под одеяло или възглавница. Може да се стигне до прекомерно нагриване, което да причини пожар, токов удар или нараняване.
2. Необходимо е внимателно наблюдение, когато уредът се използва от, върху или в близост до деца, болни или лица с увреждания.
3. Използвайте уреда само по предназначението, описано в това ръководство. Не използвайте приставки, които не са препоръчани от производителя.
4. Никога не работете с уреда, ако той не функционира правилно, ако е повреден или ако е бил изпуснат във вода.
5. Никога не изпускайте и не поставяйте предмети в отворите на уреда.
6. Не използвайте уреда там, където се употребяват аерозолни продукти (спрейове) или се подава кислород.

ЗА БАТЕРИЯТА

1. Не използвайте уреда по време на къпане или под душа.
2. Не поставяйте и не съхранявайте уреда на място, откъдето може да падне или да бъде издърпан във вана или мивка.
3. Не поставяйте и не изпускайте уреда във вода или друга течност.
4. Никога не използвайте уреда върху мека повърхност, като легло или диван, където отворите за въздух могат да бъдат блокирани.
5. Не излагайте уреда или батерията на прекомерни температури.
6. Имайте предвид риска клемите на уреда или на батерията да бъдат дадени на късо от метални предмети.
7. Уредът съдържа батерия, която не подлежи на смяна. В края на живота на батерията уредът трябва да бъде изхвърлен по правилния начин.
8. Не разглобявайте, не отваряйте и не разкъсвайте батерията.
9. Не подлагайте клетките или батериите на механичен удар.

10. При изтичане на клетка не допускайте течността да влезе в контакт с кожата или очите. При контакт измийте засегнатата зона с обилно количество вода и потърсете лекарска помощ.
11. Акумулаторните клетки и батерии трябва да се заредят преди употреба. Винаги използвайте правилното зарядно устройство и спазвайте указанията на производителя за зареждане.
12. Не оставяйте батерията да се зарежда продължително време, когато не се използва.
13. След дълъг период на съхранение може да се наложи клетките или батериите да бъдат заредени и разредени няколко пъти, за да се постигне максимална производителност.
14. **ВНИМАНИЕ:** Батерията в този уред може да представлява риск от пожар или химическо изгаряне при неправилно боравене. Не я презареждайте по неправилен начин, не я разглобявайте и не я нагрявайте над 100 °C (212 °F).

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Данни за производителя на батерията

Dongguan Lean Power New Energy Technology Co., Ltd., Room 201, Building 3, No. 7
Jinchuan Second Road, Jinchuan Industrial Zone, Xiegang Town, Dongguan City, Guangdong
Province, Китай. www.leanpowercell.com, xi@sdikj.com

УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА

1. Зареждане

1. Заредете уреда напълно преди първата употреба.
2. Зареждайте с включения кабел и зарядно 5V / 1A постоянен ток (не е включено в комплекта), когато индикаторът мига бавно в червено и прозвучи гласовото съобщение „Low power, please charge“ („Ниско ниво на батерията, моля заредете“).
3. Пълното зареждане отнема около 3 часа. След края на зареждането индикаторът свети постоянно в червено.

4. Ако уредът се зарежда при напрежение над 5V, индикаторът мига бързо в червено в продължение на една минута и след това угасва. Това означава, че се използва неподходящо зарядно устройство.

Не използвайте уреда, докато се зарежда.


Забележка:

При първа употреба се препоръчва да започнете със слаб натиск и да преминете на силен натиск, ако ви е приятно. Ако усетите болка по време на употреба, върнете се на слаб натиск или разхлабете лентата за глава. Не се препоръчва употреба на уреда повече от 20 минути наведнъж. Зрението ви може да остане замъглено за кратко след употреба – това е нормално. Препоръчва се да затворите очи за няколко минути, докато зрението се възстанови. След употреба избърсвайте потта, околоочния крем или остатъците от козметика от повърхността от протеинова кожа, за да удължите живота на уреда.

2. Поставяне

1. Свалете всички аксесоари за очи (очила, контактни лещи, изкуствени мигли и други), които биха попречили на употребата.
2. Поставете уреда и се уверете, че приляга правилно върху очите. Нагласете ластичната лента в задната част на главата според размера си.

3. Работа с уреда

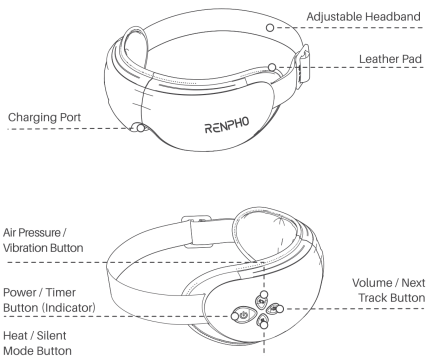

Надписите върху схемите означават: „Adjustable Headband“ – регулируема лента за глава, „Leather Pad“ – подложка от протеинова кожа, „Charging Port“ – порт за зареждане, „Power / Timer Button (Indicator)“ – бутон за захранване и таймер (с индикатор), „Heat / Silent Mode Button“ – бутон за нагряване и тих режим, „Air Pressure / Vibration Button“ – бутон за въздушен натиск и вибрация, „Volume / Next Track Button“ – бутон за сила на звука и следваща мелодия.

Бутон за захранване и таймер



- Задръжте, за да включите или изключите уреда. При включване индикаторът свети постоянно в бяло.

- Натиснете кратко, за да превключите таймера за автоматично изключване между 10, 15 (по подразбиране) и 20 минути.

Бутон за нагряване и тих режим



- Натиснете кратко, за да превключите между ниска степен на нагряване, висока степен (по подразбиране) и изключено нагряване.
- Задръжте, за да превключите между гласов режим (по подразбиране) и тих режим. В тих режим гласовите съобщения и музиката са изключени.

Бутон за въздушен натиск и вибрация



- Натиснете кратко, за да превключите натиска между слаб (по подразбиране), силен и без натиск.
- Задръжте, за да включите или изключите вибрацията. По подразбиране вибрацията е изключена.

Бутон за сила на звука и следваща мелодия



- Натиснете кратко, за да изберете сила на звука между ниво 0 (по подразбиране), 1, 2, 3, 4 и 5 (максимална сила).
- Задръжте, за да преминете към следващата мелодия.

Ако са избрани „без натиск“ и „без температура“ и вибрацията е изключена, уредът се изключва автоматично след 10 секунди без активност.

4. Bluetooth връзка

Включете Bluetooth на смартфона си. Потърсете устройство „R-G006“ и се свържете, за да слушате собствената си музика през уреда. След успешно сдвояване индикаторът светва постоянно в синьо и при следващо включване уредът се свързва автоматично.

Bluetooth връзката служи само за възпроизвеждане на музика. Уредът не измерва, не събира и не изпраща здравни данни и не работи с мобилно приложение.

След установяване на Bluetooth връзка музиката се възпроизвежда през уреда със сила на звука по подразбиране ниво 5.

5. Таймер за автоматично изключване (10 / 15 / 20 минути)

След като таймерът бъде зададен, уредът работи избраното време и след това се изключва автоматично.

6. Функция за памет

При повторно включване уредът възстановява последните настройки за въздушен натиск, вибрация, нагряване и таймер.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Механичен звук или звук от въздух в уреда	Нормален звук от въздушния натиск или от надуването на възглавничките	Не е необходимо действие
Уредът не се включва	Изтощена батерия	Заредете уреда

Проблем	Възможна причина	Решение
Слаба интензивност на масажа или слаб въздушен натиск	Ниско ниво на батерията	Заредете уреда
Уредът спря да работи внезапно	Изтощена батерия	Заредете уреда
Уредът спря да работи внезапно	Задействал се е вграденят таймер за автоматично изключване	Включете уреда отново за нова сесия, ако е необходимо. Не се препоръчва употреба над 20 минути наведнъж
Уредът не се зарежда	Използва се кабел за зареждане от друг тип	Използвайте само включения кабел за зареждане
Уредът не се зарежда	Използва се неподходящо зарядно с напрежение, различно от посоченото	Използвайте само зарядно 5V / 1A постоянен ток
Уредът не се зарежда	Задействала се е защитата при ниско ниво на батерията след дълъг период без зареждане	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване

Проблем	Възможна причина	Решение
Няма нагряване	Избрано е „без температура“ или ниска степен на нагряване	Превключете на висока степен на нагряване
Няма нагряване	Задействала се е вградената защита от прегряване поради продължителна употреба	Изключете уреда и го оставете да се охлади
Няма нагряване	Уредът има нужда от време, за да се загрее	Изчакайте една минута след включване
Няма въздушен натиск	Избрано е „без натиск“	Превключете на слаб или силен натиск
Няма гласови съобщения или музика	Силата на звука е твърде ниска или е на ниво 0	Регулирайте силата на звука
Няма гласови съобщения или музика	Активиран е тих режим	Превключете на гласов режим

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1. Изключете уреда преди почистване. Използвайте мека памучна кърпа, навлажнена с мек почистващ препарат.

2. Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина или на висока температура. Ако уредът не е използван повече от 3 месеца, заредете го преди употреба.
3. Не разглобявайте уреда сами – това може да го повреди.
4. Животът на батерията зависи от начина и условията на употреба. Ако уредът няма да се използва дълго време, съхранявайте го изключен и го зареждайте веднъж месечно, за да удължите живота му.

ЗА ПРОДУКТА

Какво има в кутията

- Масажор за очи Eyeris 2 × 1
- Кабел за зареждане USB-C × 1
- Чанта за съхранение × 1

Технически спецификации

Наименование	Масажор за очи
Модел	R-G006
Вход	5V / 1A (постоянен ток)
Номинална мощност	5 W
Капацитет на батерията	1500 mAh, 5,55 Wh
Тегло на продукта	325 г
Размери на продукта	205 × 115 × 97 мм

Диапазон на нагряване

40 °C – 45 °C

Масажни режими

5

Таймер

10 / 15 / 20 минути

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Свържете се с нас при въпроси или затруднения. Екипът за обслужване на клиенти на RENPHO осигурява бърз отговор в рамките на работното време.

Телефон (Обединено кралство)

+44 (0)7434 666088, понеделник – петък,
9:00 – 17:00 (GMT)

Имейл (ЕС и УК)

support-eu@renpho.com

При дефектни продукти или връщане на артикули се свържете с нас, като посочите номера на поръчката си. НЕ изхвърляйте части от продукта – те може да са необходими за проверка или ремонт.

ИЗХВЪРЛЯНЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ



Символ „зачеркнат контейнер“

Символът на зачеркнатия контейнер означава, че по закон сте задължени да изхвърляте тези уреди отделно от несортираните битови отпадъци. Батериите и акумулаторите, които не са трайно вградени, трябва да бъдат извадени предварително и изхвърлени отделно.

Връщане на стари уреди

Собствениците на стари уреди могат да ги предадат в предвидените от публичните органи по управление на отпадъците пунктове за връщане или събиране, за да се осигури правилното им третиране.

Лични данни

Всички крайни потребители носят отговорност за изтриването на личните си данни от уредите, които предават за изхвърляне.



Батерии и акумулатори

1. Символът на зачеркнатия контейнер върху батерии или акумулатори означава, че те не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци в края на живота им.
2. По закон сте задължени да върнете старите батерии и акумулатори след употреба. Това може да стане безплатно в пункт за събиране във вашия район. Адреси на подходящи пунктове можете да получите от общината.
3. Батериите може да съдържат вещества, вредни за околната среда и човешкото здраве. Разделното събиране и рециклиране цели да предотврати тези негативни последици.
4. Избягвайте образуването на отпадъци от батерии – не оставяйте небрежно батерии или електрическо и електронно оборудване, съдържащо батерии, на обществени места.



Декларация за съответствие

С настоящото Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. декларира, че това оборудване съответства на Директива 2014/53/ЕС, Директива 2011/65/ЕС и другите приложими разпоредби. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Максимална радиочестотна мощност	-0,11 dBm
---	-----------

Работна честота	2402 MHz – 2480 MHz
------------------------	---------------------

Производител: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd., No. 810-C063, 8th Floor,
Xiangbin International Financial Centre, No.18, West Free Trade Street, Qianhai Bay,
Shenzhen, Guangdong Province, 518000, Китай.