

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

МАСАЖОР ЗА СТЬПАЛА

Модел: RF-FM062



Прочетете внимателно ръководството преди употреба
и го запазете за бъдеща справка.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност	01
Технически спецификации	02
Запознайте се с уреда	03
Функции	04
Работа с уреда	05
Регулируема стойка и почистване	06
Отстраняване на проблеми	06
Обслужване на клиенти	07
Изхвърляне и съответствие	08

Благодарим ви, че избрахте масажора за стъпала RENPHO с функции за месене и загряване. Прочетете внимателно ръководството преди употреба и го запазете на сигурно място за бъдеща справка. При нужда от съдействие се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА.

1. Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
2. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – за да намалите риска от изгаряния, пожар, електрически удар или нараняване, спазвайте точките по-долу.
 - Никога не оставяйте уреда без надзор, докато е включен в контакта. Изключвайте го от контакта, когато не се използва, както и преди поставяне или сваляне на части.
 - Не използвайте уреда под завивка или възглавница. Възможно е прекомерно нагряване, което да причини пожар, електрически удар или нараняване.
 - Необходимо е строго наблюдение, когато уредът се използва от, върху или в близост до деца, болни или хора с увреждания.
 - Използвайте уреда само по предназначението, описано в това ръководство. Не използвайте приставки, които не са препоръчани от производителя.
 - Никога не използвайте уреда с повреден кабел или щепсел, ако не работи правилно, ако е бил изпускан или повреден, или ако е паднал във вода.
 - Не носете уреда за захранващия кабел и не използвайте кабела като дръжка.
 - Пазете кабела далеч от нагорещени повърхности.
 - Никога не използвайте уреда със запушени вентилационни отвори. Пазете отворите чисти от мъх, косми и подобни.
 - Никога не изпускайте и не поставяйте предмети в отворите на уреда.
 - Не използвайте уреда на открито.
 - Не използвайте уреда там, където се употребяват аерозолни продукти (спрейове) или се подава кислород.

- За да изключите уреда, поставете всички бутони в изключено положение и извадете щепсела от контакта.
4. Уредът трябва да се използва само със захранващия блок, доставен с него.
 5. Уредът трябва да се захранва само с безопасно свръхниско напрежение, отговарящо на маркировката върху него.
 6. Уредът има нагриваща се повърхност. Хората с намалена чувствителност към топлина трябва да внимават при употреба.
 7. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** използвайте нагриващите се повърхности внимателно. Възможни са сериозни изгаряния. Не използвайте върху участъци с намалена чувствителност или при нарушено кръвообращение. Употребата на функцията за загряване без надзор от деца или от лица с ограничени възможности може да бъде опасна.
 8. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не стъпвайте прави върху уреда и не влизайте в него. Използвайте го само в седнало положение.
 9. Уредът е предназначен само за домашна употреба и не е предвиден за медицински цели. Не бива да се използва за лечение или облекчаване на заболяване или необичайно физическо състояние.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Наименование	Шиаци масажор за ходила
Модел	RF-FM062
Номинално напрежение	12 V постоянен ток, 2,5 A
Номинална мощност	30 W
Масажни глави	6 (по 3 под всяко стъпало)
Масажни възли	18 (по 3 на всяка глава)


Скорости	2 (бавна и бърза)
Загряване	Да, включва се отделно
Размер на стъпалото	до EU 49
Автоматично изключване	след 15 минути
Цвят	Черен

Какво има в кутията

- Масажор за стъпала × 1
- Захранващ адаптер × 1
- Ръководство за потребителя × 1

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С УРЕДА

PRODUCT OVERVIEW

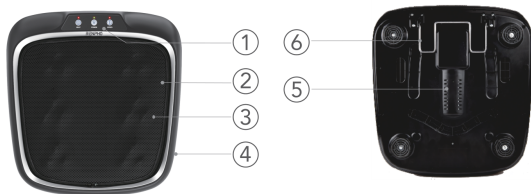


1. Control panel buttons: Heat, Power, Speed
2. Massage nodes
3. Washable cover

4. Power interface
5. Heat emission holes
6. Adjustable stand

Надписите върху оригиналната схема означават: „PRODUCT OVERVIEW“ – преглед на продукта; 1. „Control panel buttons: Heat, Power, Speed“ – бутони на панела за управление: топлина, захранване, скорост; 2. „Massage nodes“ – масажни възли; 3. „Washable cover“ – перящ се калъф; 4. „Power interface“ – извод за захранване; 5. „Heat emission holes“ – отвори за отвеждане на топлината; 6. „Adjustable stand“ – регулируема стойка.

ФУНКЦИИ

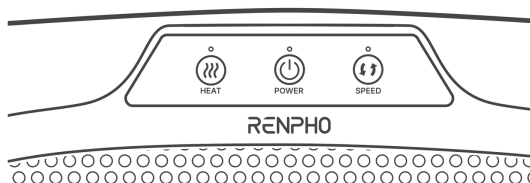

HEAT (топлина)	Натиснете, за да включите или изключите загреването.
POWER (захранване)	Натиснете, за да включите или изключите масажора.
SPEED (скорост)	Натиснете, за да превключите скоростта на въртене между ниско и високо ниво.
Свалящ се калъф	Разкопчайте ципа, за да свалите калъфа и да го почистите. Пере се в пералня.
Регулируема стойка	Променя височината и наклона на масажора за стъпала.

РАБОТА С УРЕДА

1. Включете уреда в електрическата мрежа.
2. Когато индикаторът за захранване свети червено, масажорът е в режим на готовност. Зеленият цвят означава, че масажорът работи.
3. Натиснете бутона „POWER“, за да включите масажора. Първата и третата масажна глава под лявото стъпало се въртят по часовниковата стрелка, а втората – обратно на часовниковата стрелка. За дясното стъпало съответните глави се въртят в обратната посока.
4. Натиснете бутона „HEAT“, за да включите или изключите функцията за загряване.
5. Натиснете бутона „SPEED“, за да промените скоростта на въртене. Мигащата червена светлина означава ниска скорост, а постоянната червена светлина – висока скорост.
6. Масажорът за стъпала се изключва автоматично след 15 минути непрекъсната работа, за да се избегне прегряване.
7. За да свалите калъфа, просто разкопчайте ципа. Калъфът се пере в пералня.
8. От съображения за безопасност моторът се изключва автоматично, когато температурата се повиши прекалено много поради дълъг масаж или голямо натоварване. След като температурата спадне, моторът отново заработва нормално.

Препоръчваме да ограничите употребата до 30 минути на сесия, за да избегнете лек дискомфорт или болка.

РЕГУЛИРУЕМА СТОЙКА И ПОЧИСТВАНЕ



Сгъваемата стойка от долната страна променя височината и наклона на уреда, така че масажните глави да попадат правилно под стъпалото. Уредът е подходящ за стъпала до размер EU 49.

- Изключете уреда от контакта и го оставете да изстине преди почистване.
- Разкопчайте ципа, свалете мрежестия калъф и го изперете в пералня.
- Избърсвайте корпуса със суха или леко влажна кърпа. Не потапяйте уреда във вода.
- Пазете отворите за отвеждане на топлината от прах и мъх.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем	Причина	Решение
Уредът не работи	Прекъснато захранване или хлабаво включен щепсел.	Включете уреда отново към захранването.

Проблем	Причина	Решение
Уредът не работи	Моторът се е изключил автоматично поради продължителна работа.	Използвайте масажора, след като моторът изстине.
Загряването не работи или не е както се очаква	Функцията за загряване е изключена.	Натиснете бутона „HEAT“, за да включите загряването.
Загряването не работи или не е както се очаква	Недостатъчно време за загряване.	Моторът се нуждае от около 7 до 10 минути, за да загрее напълно. Това е с цел температурата да не се повишава прекалено бързо.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Свържете се с нас при въпроси или затруднения. Екипът за обслужване на клиенти на RENPHO отговаря бързо в рамките на работното време.

Телефон (Обединено кралство)	+44 (0)7434 666088, понеделник – петък, 9:00 – 17:00 (GMT)
Имейл (ЕС и Обединено кралство)	support-eu@renpho.com

При дефектни продукти или връщане на артикули се свържете с нас, като посочите номера на поръчката си. НЕ изхвърляйте части от продукта – те може да са необходими за проверка или ремонт.

ИЗХВЪРЛЯНЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ

- Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци.
- Предайте го в местен пункт за събиране или рециклиране съгласно директивата на ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE).
- При въпроси се обърнете към местните органи по управление на отпадъците.



Символ „зачеркнат контейнер“

Символът на зачеркнатия контейнер означава, че по закон сте задължени да изхвърляте тези уреди отделно от несортираните битови отпадъци. Батериите и акумулаторите, които не са трайно вградени, трябва да бъдат извадени предварително и изхвърлени отделно.

Връщане на стари уреди

Собствениците на излязло от употреба оборудване могат да го предадат в предвидените от публичните органи пунктове за връщане или събиране, за да се осигури правилното му третиране.



Декларация за съответствие

С настоящото Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. декларира, че това оборудване съответства на Директива 2014/30/ЕС, Директива 2014/35/ЕС, Директива 2011/65/ЕС и другите приложими разпоредби. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Производител: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd., No. 810-C063, 8th Floor, Xiangbin International Financial Centre, No.18, West Free Trade Street, Qianhai Bay, Shenzhen, Guangdong Province, 518000, Китай.